


## Пошаговая инструкция



Заполните этикетку на пробирке:  
[N] Имя и Фамилия  
[A] Дата рождения  
[D] Дата взятия пробы [S] Пол




Перед испражнением положите в унитаз приложенный бумажный удерживатель для кала или несколько слоев туалетной бумаги так, чтобы кал не погрузился в воду.

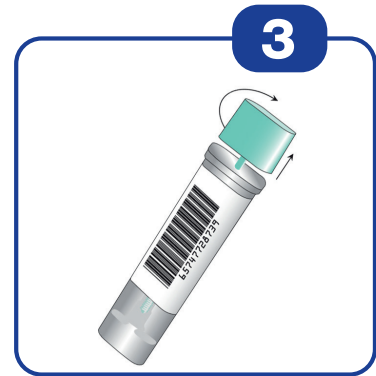


После испражнения возьмите пробирку и аккуратно, слегка повернув, вытащите из пробирки бирюзовую крышку вместе со стержнем для забора пробы.




Проведите острием бирюзового стержня по различным частям пробы.

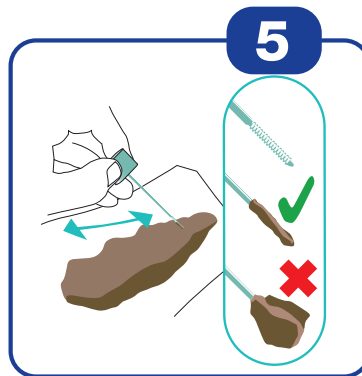


Стержень не должен быть переполнен. Только желобки стержня должны быть заполнены калом. Даже небольшого количества пробы достаточно для анализа.

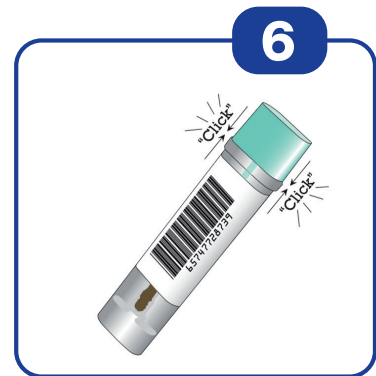

Вставьте стержень обратно в пробирку (только один раз) и закройте ее с отчетливым щелчком. Не повторяйте забор пробы!

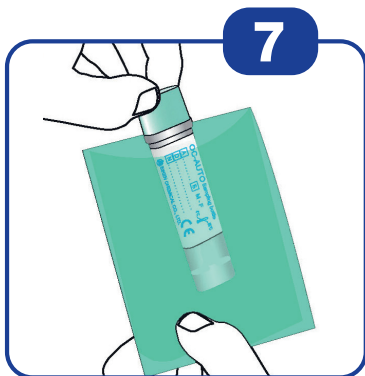

Сильно встряхните пробирку, поместите ее в зеленый пластиковый пакет и по возможности отнесите ее в день забора пробы Вашему врачу (или в пункт выдачи).

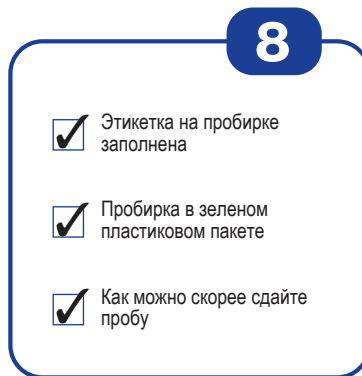

Пожалуйста, проверьте!

MD V.4.0 / 2022-07-19 (ru)

IVD CE

EC REP

**Advena Ltd.**

Tower Business Centre, 2nd Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



**EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**

4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

Распространение и импорт:

**Mast Diagnostica GmbH**

Feldstraße 20  
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0

Fax +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de

www.fit-screening.de